

Proteja você e seus clientes!



Uma em cada dez manicures tem ou teve hepatite.

PESQUISA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO PAULO.

Uma pesquisa mostra que uma em cada dez manicures paulistanas foi infectada pelo vírus das Hepatites B ou C, doenças graves transmitidas pelo sangue. Alicates, espátulas e até lixas manipuladas por elas podem ser meios de contaminação.*

- Todas as manicures usam os instrumentos em si mesmas.
- 85% delas não sabiam que o sangue infectado transmite as hepatites B e C.
- 74% não se vacinaram contra a hepatite B.
- 54% procuram esterilizar seus instrumentos em estufa, mas não o fazem na temperatura e no tempo adequados.
- 26% procuram esterilizar seus instrumentos em autoclave, mas não sabem usá-la corretamente.
- 8% aquecem os instrumentos em fornos de cozinha, o que não surte efeito esterilizador.
- Nenhuma lava as mãos entre um cliente e outro.

Conheça os produtos Cristófoli



Autoclave Vitale Class
12 e 21 Litros

Acesse o vídeo
Beleza e Saúde
em suas Mãos:



Mini-incubadora Cristófoli




Indicador Químico SIL-250



Envelopes Autosselantes



Embalagens Tubulares
para Esterilização

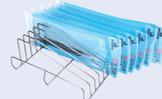

Suporte para Envelopes



Indicador Químico
Integrador SteamPlus

CRISTÓFOLI
BIOSSEGURANÇA

**Cristófoli Equipamentos
de Biossegurança Ltda.**

Rod. BR 158, nº 127 - Campo Mourão / PR
CEP 87303-327 - Fone: 44 3518-3431
0800 44 0800 - www.cristofoli.com

www.cristofoli.com/biosseguranca

Consultoria gratuita em biossegurança:

www.cristofoli.com/biosseguranca - liliana@cristofoli.com

Liliana Junqueira de P. Donatelli, MPH

Bióloga CRBio 18469/01-D - Mestre em Saúde Coletiva
Consultora em Biossegurança Cristófoli

*Fonte: Oliveira, ACDS; Focaccia, R. Survey of hepatitis B and C infection control procedures at manicure and pedicure facilities in São Paulo, Brazil. - Braz J Infect Dis 2010; 14(5):502-507 PPMRev2 / 2019 - MPR.01015

WWW.CRISTOFOLI.COM

Passo a Passo
para **Limpeza** e
Esterilização dos
instrumentais
para manicures.



PROTEJA VOCÊ E SEUS CLIENTES! PASSO A PASSO

CRISTÓFOLI - A MARCA DA PROTEÇÃO.

- ✓ Vacinação contra Hepatite B: Disponível e gratuita em postos de saúde para profissionais do ramo: 1ª dose, 2ª dose após 30 dias, e 3ª dose 6 meses após a 1ª (eficaz em 95%).



Use sempre:

- Luvas de procedimento descartáveis para cada cliente. Lave as mãos antes de colocá-las e depois de retirá-las.
- Avental limpo.
- Óculos de proteção.
- Material descartável para cada cliente: lixa de unha e/ou de pé, palito para retirar esmalte, recipiente para água ou kit emoliente para cutícula (luvinha de creme).
- Kit esterilizado para cada cliente contendo uma espátula e alicate para cutícula.
- Toalhas limpas ou descartáveis para cada procedimento.




Passo a Passo Limpeza e Esterilização dos Instrumentais

Para o procedimento a seguir, utilize luvas grossas de borracha.




- 1** Deixe os instrumentos em **imersão** em detergente enzimático por dez minutos.

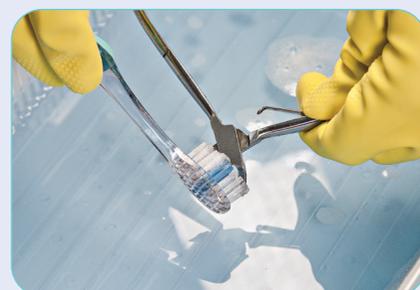

- 2** Lave os alicates e as espátulas com escova pequena e de cerdas macias.




- 3** Enxágue abundantemente os instrumentais e seque-os com papel toalha.

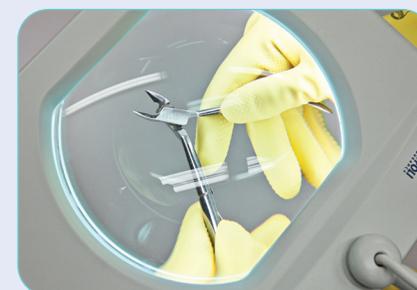

- 4** **Inspecção visual.** Para maior facilidade utilize uma lente de aumento ou uma lupa. Verifique se o alicate ficou totalmente limpo. Se necessário lave novamente.



- 5** Utilize **lubrificante** próprio para instrumental (Premix Slip®). Não enxágue nem enxugue para não remover a camada protetora.

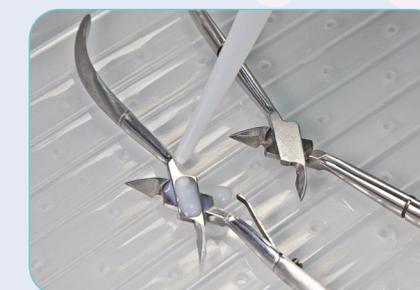

- 6** Utilize um borrifador ou gotejador para lubrificar as áreas articuladas. Movimente os alicates para facilitar a penetração do líquido.



- 7** Proteja as pontas dos alicates com gaze ou algodão.



- 8** Embale cada kit (composto por um alicate e uma espátula) em um envelope.



- 9** Posicione os envelopes no suporte (1 em cada espaço).



- 10** Coloque a quantidade de **água destilada** no copo dosador e despeje diretamente na câmara da autoclave, conforme solicitado no Manual de Instruções do equipamento.



- 11** Com o suporte de envelopes na autoclave realize o ciclo de **esterilização** conforme as recomendações de uso. Observação: No modelo Amora, o suporte para 5 envelopes acompanha o equipamento. Para os modelos Vitale Class e Vitale Class CD, o suporte é um acessório vendido separadamente e comporta até 13 envelopes 9 x 26 cm no modelo 12 litros e 26 envelopes no modelo 21 litros, utilizando 2 suportes.



Autoclave Vitale Class

- 12** Após a despressurização (Autoclave Vitale Class 12/21 e Amora), entreabra a porta para secagem. Para as Autoclaves Vitale Class CD e Vitale Plus a secagem é automática com porta fechada. Aguarde a indicação "Esfriando" no display para abrir a porta.

DICA! LUVAS GROSSAS

Depois do procedimento, não retire as luvas. Primeiro, lave-as com água e sabão, enxugue com papel toalha e desinfete-as com álcool 70%, somente então retire e guarde-as em local apropriado.

ATENÇÃO!

Autoclave é o equipamento mais recomendado para esterilização de instrumentos que resistam ao calor. Segura e fácil de operar, trabalha com ciclos entre 121° e 134° C de temperatura em presença de vapor e pressão. O tempo médio do ciclo completo, incluindo a etapa de secagem varia entre 35 minutos (Amora) e 1 hora (Vitale Class / Vitale Class CD). Entre em contato conosco pelo e-mail liliana@crisstofoli.com ou pelo Blog Biossegurança www.crisstofoli.com/biosseguranca